



CareMat®

Bruksanvisning

Betriebsanleitung


Operating Instructions

Instructions d'utilisation

Svenska	1-5
Deutsch	6-9
English	10-13
Français	14-17

Translation of original operating instructions

Svenska

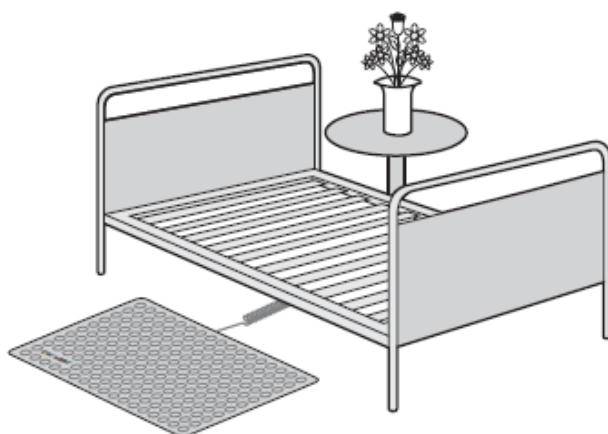

CareMat®

Den tryckkänsliga mattan för personer med demens och beägenhet att falla

Innehåll

1. Säkerhetsinstruktioner	2
2. Produktbeskrivning	2
2.1 Användningsområde	2
2.2 Struktur och funktion	2
3. Elektrisk installation	2
4. Igångsättning	2
4.1 Placera ut matta	2
4.2 Avlägsna mattan	2
4.3 Tvätt/desinfektion	2
5. Packa, transportera eller förvara	2
6. Underhåll och felsökning	2
7. Tekniska data	2

1. Säkerhetsinstruktioner

Viktigt

Dessa instruktioner måste läsas igenom noggrant innan du ansluter och använder CareMat®.

Behåll bruksanvisningen ifall du behöver konsultera den igen. Garantin upphör att gälla om skador uppstår på produkten, på egendom eller personer på grund av bristande efterlevnad av dessa instruktioner.



Anvisningar till installatören

- Den elektriska installationen och igångsättning av produkten får endast utföras av specialist.
- Produkten får inte anslutas till nätspänning (se punkt 3, Elektrisk installation).



Instruktioner för vårdpersonalen

- CareMat är ingen säkerhetsprodukt eller en medicinsk produkt.
- CareMat ger endast stöd för vårdpersonalen men ersätta dem inte.
- CareMat måste kontrolleras för korrekt funktion före användning.

2. Produktbeskrivning


2.1 Användningsområde

CareMat® har utformats för användning i vårdhem, sjukhus, på psykiatriska avdelningar samt i särskilt boende. Nödvändig vård för och tillsyn av personer som har demens eller som är benägna att falla kräver ökade ansträngningar och insatser från vårdpersonalen. Det är här CareMat® erbjuder stöd genom att avsevärt minska risken för fall, liksom faran för att patienter försvinner och går vilse. CareMat® ökar också därmed också sinnesfriden för berörda anhöriga.

Den större versionen av CareMat® är 1,1 m lång och därför lämplig att placera vid sängkanten, direkt framför patientens säng. Så snart personen lämnar sängen och kliver på mattan larmas vårdpersonal och kan ge en snabb och specifik hjälp. Den något mindre versionen är 70 cm lång och kan användas som dörrmatta. Detta tillåter personer i behov av vård att röra sig fritt inom ett visst rum eller avdelning, medan de fortfarande har god tillsyn och skyddas från att gå vilse och bli desorienterade.


2.2 Struktur och funktion

1. 2-tråds spiralkabel för anslutning till larmsystem
2. Sluttande kanter för att undvika risken för att snubbla
3. Halkfri och motståndskraftig yta med aktiv-grepp struktur

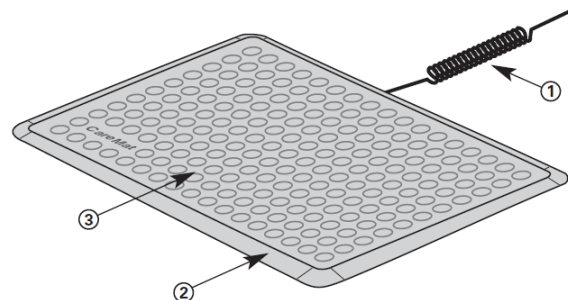


CareMat har tryckkänsliga sensorer och ska placeras direkt framför patientens säng och anslutas till passande larmsystem.

Så snart personen lämnar sängen och kliver på sensorerna, d v s mattan, aktiveras sensorerna och en spänningsfri kontakt sluts. Detta utlöser larmsystemet.

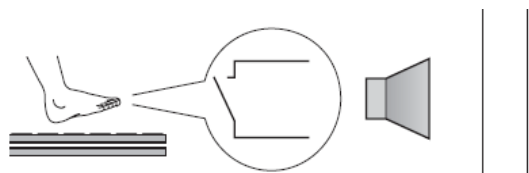


CareMat ej aktiverad – inget larm utlöses

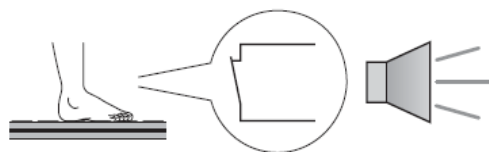

Caremat aktiverad larm via larmsystem

3. Elektrisk installation


Använd rätt kontakt för anslutning till alarmsystemet, vid osäkerhet kontakta leverantören utav utrustningen.

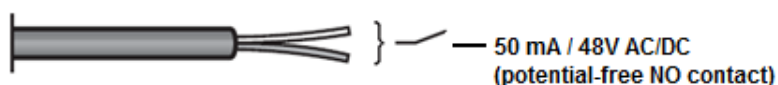


Efter att utrustningen har installerats måste elektriker utföra en funktionskontroll.

4. Igångsättning

4.1 Placera ut matta

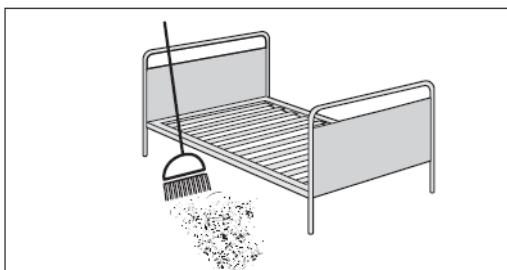

Städa golvet där ni avser placera mattan. CareMat måste ligga plant på en jämn yta, fri från partiklar.

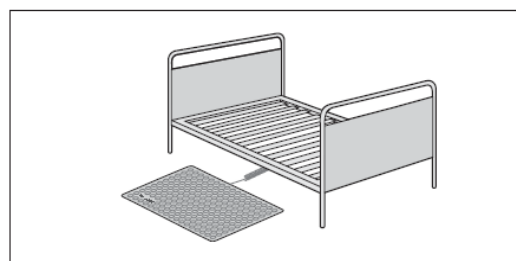


Placera CareMat® direkt framför sängen så att personen kliver på mattan. Lägg kabeln under sängen för att undvika att personen snubblar.


Vanligtvis behöver inte CareMat® fästas vid golvet. Om du ändå vill göra detta, använd då dubbelhäftande tape för att förhindra mattan från att röra sig.



- Mattan får inte skruvas eller spikas fast vid golvet.
- Inga föremål placeras över kabeln.
- Undvik överdriven böjning eller sträckning av kabeln.

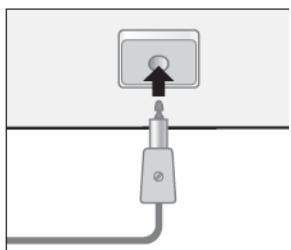


Sätt i kontakten. CareMat är redo för omedelbar användning.

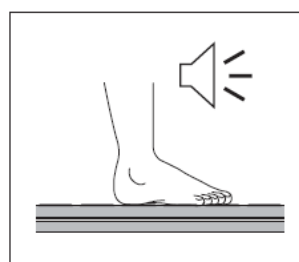


Kontrollera CareMat funktion före varje användning.

4.2 Avlägsna mattan

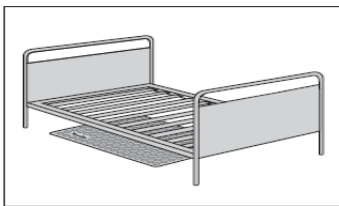

När CareMat inte används kan den skjutas under sängen. Kabel till alarmsystemet behöver ej avlägsnas.

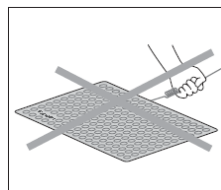

Avlägsna CareMat innan du flyttar sängen. Detta undviker skador på matta eller kabel. Undvik överdriven böjning eller sträckning av kabeln.

4.3 Tvätt/desinfektion

- Koppla från kabeln till alarmsystemet innan mattan rengörs.
- Du kan rengöra mattan med en borste under rinnande vatten. Var försiktig så att inte kabelns kontakt sköljs med vatten.
- Du kan rengöra mattan med vanligt desinfektionsmedel eller tvättmedel, dock ej med högre alkoholhalt än 70%.
- Använd inte kaustik soda eller lut.
- CareMat[®] kan inte autoklaveras eller desinficeras med ånga.

5. Packa, transportera eller förvara

- Förvara CareMat[®] utrullad på en plan yta i en torr, ren miljö.
- Lämplig förvaringstemperatur är mellan -25° C och +70° C.
- Undvik överdriven böjning eller sträckning av mattan
- Skydda mattan från vassa och skarpa föremål.
- Placera inte tunga föremål ovanpå mattan och stapla högst 10 mattor ovanpå varandra.

6. Underhåll och felsökning

Mattan är i huvudsak underhållsfri.

Om inte mattan fungerar tillfredställande, kontrollera dessa punkter:

- Fungerar larmen som CareMat anslut till?
- Är mattan ansluten till larmsystemet?
- Har CareMat under installationen fått kabeln mycket böjd eller hårt belastad?
- Har CareMat synliga skador?
- Är golvet under mattan fri från smuts?
- Ligger CareMat plant på golvet?

Om dessa krav är uppfyllda utan att tillfredställande funktion kan erhållas kontakta inköpsstället.

7. Tekniska data

Artikel nummer	EMC-xA	EMC-xB
Dimension i mm (L x b x h)	1100 x 700 x 9	700 x 400 x 9
Vikt i kg	7,5	3
Färg	X= 1 (gul) X= 2(svart)	
Yta	Aktiv gripande struktur	
Kabel	Helix, PU, 2 x 0,5 mm	
Kabel längd	4 m	
Kabel infästning	Långsida (1100 mm)	Kortsida(400 mm)
Material	Polyuretan (PUR)	
Utsignal	Spänningsfri NO kontakt	
Laddningskapacitet (kontakt spänning)	Max 48 V AC/DC, 50 mA	
Minsta vikt	35 kg	
Kemisk resistans	Vatten (rumstemperatur) kroppsvätskor, Kommersiella desinfektionsmedel, max 70% alkohol	
Skyddsklass	IP67 utan kabel och ändkontakt	
Isolering	> 1500 V AC (till jord)	
Arbetstemperatur	Mellan -25° C och +70° C	